





Holter de Presión WELCH ALLYN

1. Corroborar los datos del paciente, verificar orden médica.
2. Explicar el procedimiento al paciente
3. Ingresar al Software

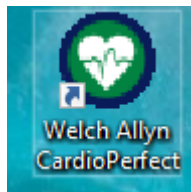


4. Se abrirá la siguiente ventana, se debe ingresar con las credenciales definidas.

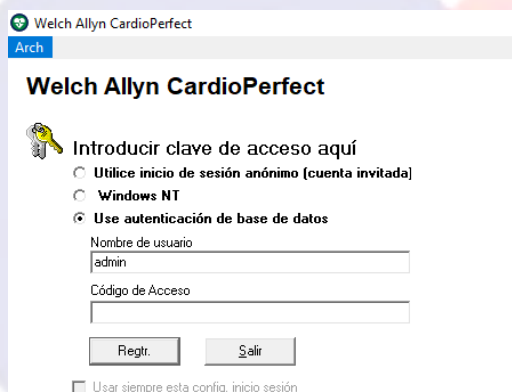

5. Para instalar la maquina esta debe ser conectada al computador con pilas y encendida con el botón que tiene en la parte superior.



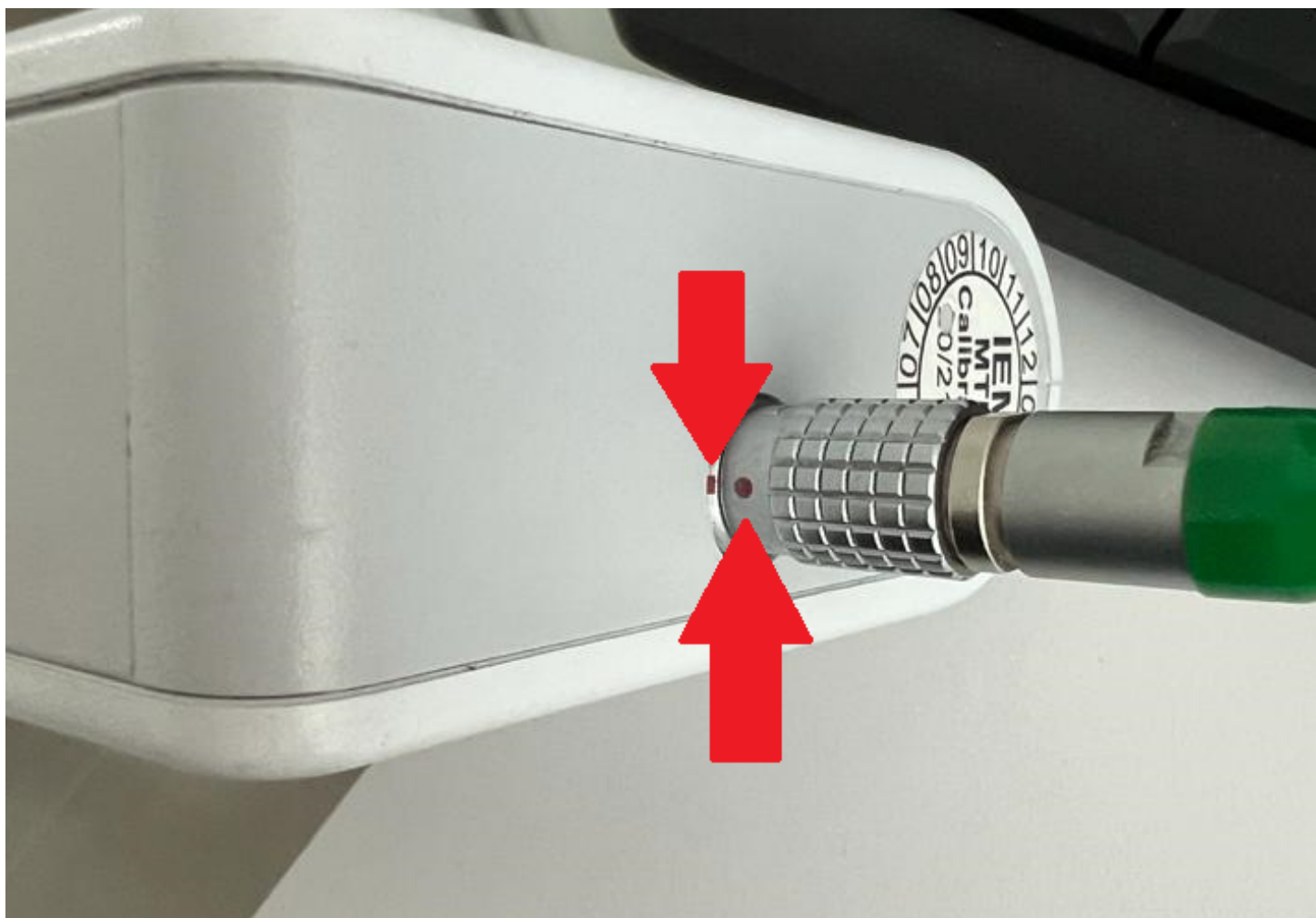


6. Al conectar la maquina se debe fijar que solo tiene una postura el cable al adaptador de la maquina ambos tiene una marca roja se deben poner ambas marcas en la misma posición
7. En la pantalla debe decir “co” al momento de estar conectada al computador.



8. Si no aparece “co” en la pantalla del equipo, mantener presionado el botón que se muestra a continuación.



9. Luego en el software se debe presionar “paciente”

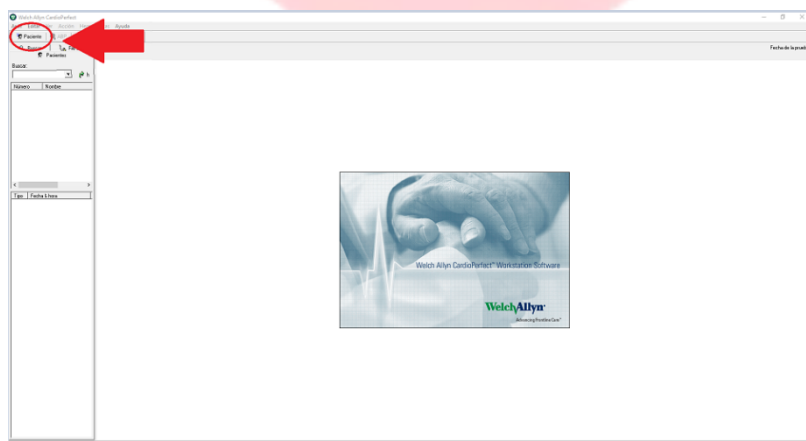



10. Ingresar los datos del paciente todo con mayúscula, luego presionar aceptar.

Ficha de Paciente -

General | Dirección | Historial

Introducir nombre, número y datos médicos de este paciente aquí

Número:

Apellidos Iniciales Nombre

Número del seguro: Número Alternativo:


Género: Fecha de nacimiento (dd-MM-yyyy) Edad: Desconocido

Raza: Peso Altura Desconocido


0 kg 0 cm

Aceptar Cancelar Ayuda

11. El siguiente paso será asignar la maquina al paciente que acabamos de crear. Esto se realiza apretando el siguiente Icono.

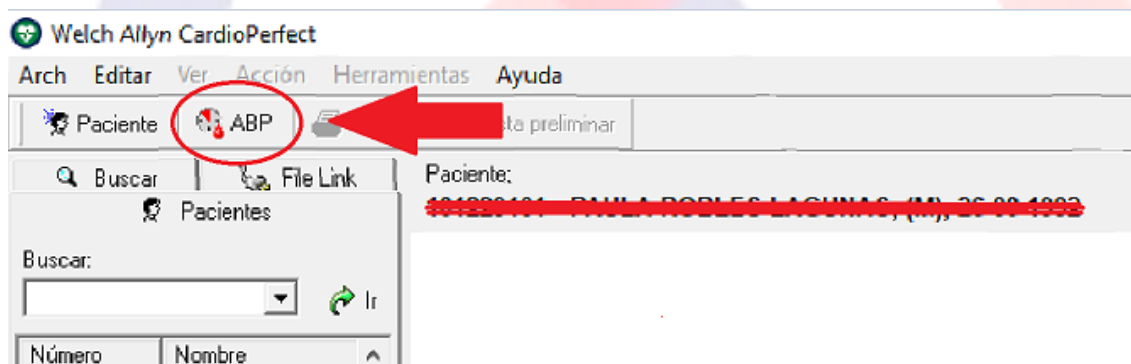

12. Se abrirá una nueva ventana en donde se puede cambiar el protocolo, como la imagen que se muestra a continuación. Ahí se debe apretar aceptar solamente, ya que el protocolo estará asignado por defecto

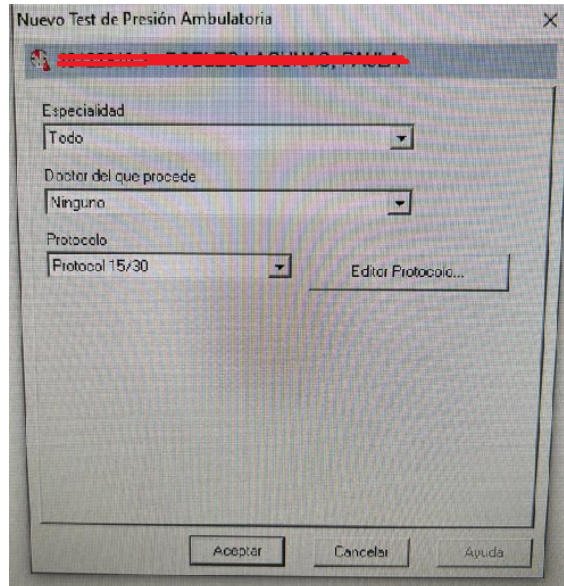

13. Luego de esto la maquina ya está programada para el estudio. Desconectarla del computador y proceder a su instalación.
14. Solicitar al paciente que se retire la ropa de la cintura para arriba, proceder a instalar manguito en brazo no dominante (de preferencia el izquierdo), instalar dos traveses de dedos sobre el pliegue del brazo
15. Verificar la correcta posición del manguito, tomando una primera presión al paciente, presionando el siguiente botón.



16. Indicaciones al paciente: realizar sus actividades de manera normal, puede hacer de todo con excepción de bañarse, porque no se puede mojar la máquina



**Instituto Cardiovascular
Plaza Egaña**

17. Tener precaución al momento que la máquina tome la presión de dejar el brazo lo más tranquilo posible.
18. La máquina tomará la presión en el día cada 15 minutos y en la noche cada 30 minutos.
19. El equipo será retirado al día siguiente, transcurridas 24 hrs.
20. Se le entregará a cada paciente una hoja de registro, en donde el deberá escribir los medicamentos que toma además de algún síntoma atingente al examen.



Instituto Cardiovascular Plaza Egaña

HOLTER DE PRESION ARTERIAL

NOMBRE:		RUT:	
F. NACIM:	EDAD:	PROCEDENCIA:	
DIRECCION:		T. CONTACTO:	
CORREO ELECTRONICO:			
ANTECEDENTES:			
INDICACION:			
Nº EQUIPO:	FECHA:	RESPONSABLE:	

MEDICAMENTOS:	DOSIS	HORA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

INDICACIONES

Usted es portador de un delicado equipo de diagnostico que **no se puede golpear ni mojar**. Este equipo está programado para tomar la Presion Arterial cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche.

Para el éxito de este examen es importante que siga las siguientes instrucciones:

Realice sus actividades habituales, excepto bañarse o ducharse.

- Retire anillos o reloj del brazo donde se pondrá el manguito.

- **No mueva el brazo y relajelo, cada vez que sienta que toma la Presión.**


Anote la hora y consigne presencia de síntomas como: dolor al pecho, mareos, zumbido de oídos, dolor de cabeza, ejercicio físico, estados emocionales, etc...

Hora en la que se acostó:	Hora en la que se levantó:


Usted debe devolver el equipo el día: _____, ____ de _____ a las _____ hrs.

Al día siguiente para descargar el examen

1. Conecta el equipo al computador
2. Buscar al paciente en el software, presionar sobre la flecha verde.

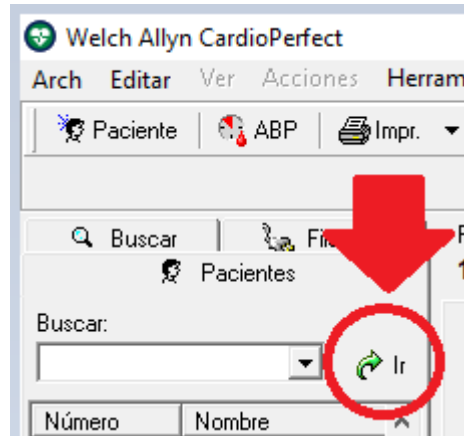

3. Se desplegará una lista de pacientes, debemos seleccionar al paciente que queremos descargar su examen. Luego abajo seleccionar la fecha del examen en curso. Finalmente aparecerá esa barra que dice leer medidas. Se debe presionar y se descargarán todas las medidas registradas por el equipo.

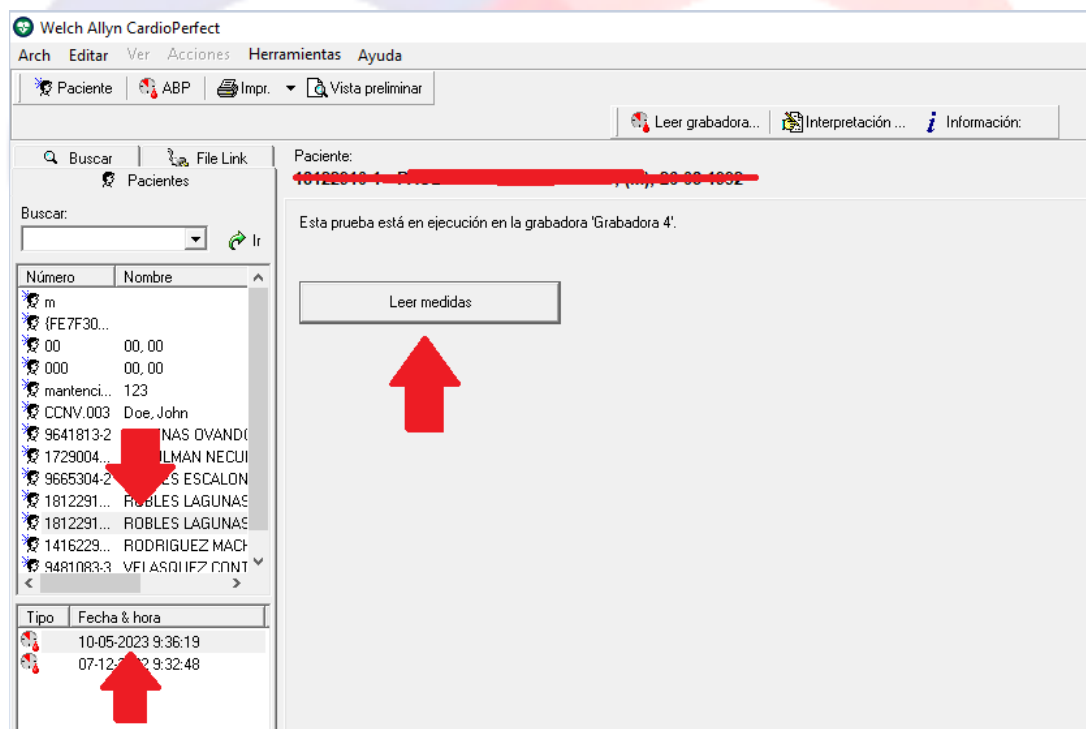

4. Finalmente se abrirá una última pestaña, en donde se debe registrar el horario en que el paciente se fue a dormir y a la hora que se levantó.



Lectura de medidas de presión ambulatoria

18122910-1 - ROBLES LAGUNAS, PAULA

Especialidad
[Todo]

Doctor que procede
[M...]

Paciente estaba durmiendo desde:
[22:00:00] hasta [8:00:00]

Número de medidas/eventos presentes:
☒ Guardar medidas de la grabadora después de guardarlas en la base de datos

Aceptar Cancelar Ayuda

5. En este momento el examen esta listo para ser informado por el Cardiólogo.